




# INSTRUKCJA ZAKŁADANIA I ZDEJMOWANIA RĘKAWIC DIAGNOSTYCZNYCH

SafeDon™


## ZAKŁADANIE RĘKAWIC

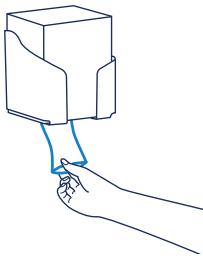


**1** Ręką dominującą wyciągnij rękawicę bez dotykania opakowania



**2** Załóż na dłoń niedominującą, trzymając rękawicę za górną część mankietu

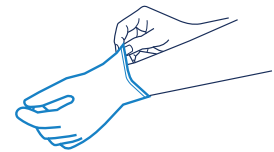

**3** Naciągnij na dłoń, trzymając za mankiet

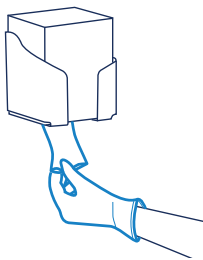

**4** Następnie ręką z założoną rękawicą wyciągnij drugą rękawicę nie dotykając opakowania




**5** Trzymając za górną część mankietu załóż na dłoń dominującą, nie dotykając skóry




**6** Naciągnij na dłoń, trzymając za mankiet, nie dotykając skóry


## ZDEJMOWANIE RĘKAWIC

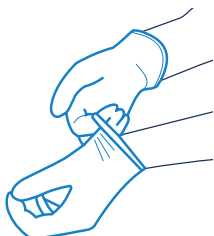


**1** Palcami dłoni dominującej chwycić za mankiet rękawicy ręki niedominującej od strony zewnętrznej nie dotykając skóry

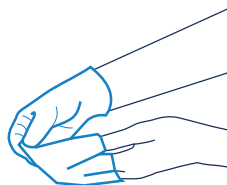

**2** Zsuń rękawicę z dłoni niedominującej, wywracając ją na drugą stronę

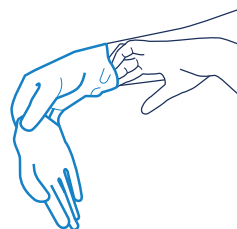

**3** Trzymając ściągniętą rękawicę ręką dominującą, wsuń palec gołej dłoni między rękawicę a nadgarstek i trzymając rękawicę od strony wewnętrznej ściągnij przez wywrócenie na

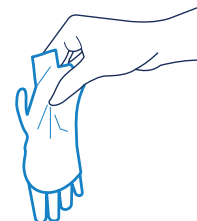

**4** Trzymając rękawicę za nieskontaminowaną część wyrzucić, traktując jako odpad medyczny